



**KALANI**  
finest natural home linen

## INSTRUCTIES VOOR HET DRAGEN EN ON- DERHOUDEN VAN JE 100% KATOENEN MASKER

- Draag dit masker wanneer je in contact komt met andere mensen dan degenen met wie je samenleeft.
- Controleer altijd of het masker goed is afgesteld en het je mond en neus bedekt.
- Opgelet: als je ziek bent, is dit masker niet geschikt. Vraag het advies van je arts.

### HOE DRAAG JE HET MASKER?



#### VOOR HET DRAGEN:

1. Was je handen voordat je het masker aanraakt met water en zeep of een oplossing op alcoholbasis.
2. Inspecteer het masker en zorg ervoor dat er geen gaten, scheuren zijn of het beschadigd is.
3. Het wordt aanbevolen om het masker op de blote huid te dragen. Vermijd contact met haar.
4. Pas het masker op geen enkele manier aan.



#### HET MASKER AANBRENGEN:

1. Houd het masker bij de linten vast.
2. Plaats het op je mond.
3. Haal de bovenste lintjes achter je hoofd door en knoop ze vast. Herhaal met de lagere lintjes achter de nek.
4. Pas het masker aan door het uit te vouwen zodat het de neus, mond en kin bedekt.  
ant de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton



#### TIJDENS HET DRAGEN:

1. Raak het masker niet aan en verplaats het niet.
2. Zet het masker nooit tijdelijk op het voorhoofd of op de kin.

### HOE ONDERHOUD JE JE MASKER?

#### VOOR GEBRUIK:

1. Bewaar het masker op een droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht. Bewaar het bij een maximale luchtvochtigheid van 75% en bij een temperatuur tussen -2 °C en +55 °C om al zijn eigenschappen te behouden.

#### VOOR HET WASSEN:

1. Was het masker in de machine met wasmiddel. Kies een wasprogramma met minimaal 30 minuten op minimaal 60 °C. Je kunt het masker samen met je andere wasgoed wassen.
2. Vergeet niet – als je er een tussen de 2 lagen stof hebt – de filter te verwijderen en weg te gooien, voordat je het masker wast.
3. Was na het aanraken van het masker je handen met water en zeep of een alcoholische oplossing.
4. Als de machine klaar is, haal je het masker eruit en geef je het opnieuw vorm door de plooiën te herschikken zonder ze te forceren.



**DRAAG ZORG VOOR JEZELF  
EN ANDEREN!**

## COVID-19

### WAARSCHUWING

Om jouw gezondheid en die van anderen te beschermen, is het erg belangrijk om deze instructies te volgen.

Ondanks alle zorg die is besteed aan de vervaardiging van deze maskers, is het enkel aan de gebruiker, en in geen geval aan de fabrikant of leverancier, om ervoor te zorgen dat het masker voldoet aan de kenmerken van de gebruiksomgeving. De hierboven beschreven aanbevelingen en gebruiksmethoden moeten nauwgezet worden gevolgd.

- Dit masker is niet bedoeld voor verplegend personeel.
- Dit masker vervangt de sanitaire veiligheidsmaatregelen tegen Corona niet (regelmatig handen wassen, fysieke afstand houden, beperking van contact met andere mensen). Het voegt een fysieke barrière toe, vooral te gebruiken wanneer je in nauw contact komt met andere mensen.



#### HET MASKER VERVANGEN:

1. Als je het masker 4u hebt gedragen.
2. Als je wilt drinken of eten.
3. Als het moeilijk wordt om te ademen.
4. Als het masker nat wordt.
5. Als het masker beschadigd is.
6. Als het masker niet meer goed tegen je gezicht past.



#### HET MASKER VERWIJDEREN:

1. Was je handen met water en zeep of een oplossing op alcoholbasis.
2. Maak de onderste en bovenste linten los om het masker van je gezicht te verwijderen.
3. Isoleer het masker in een plastic zak of een medische zak, totdat je het wast.
4. Als het masker versleten is, gooi het dan meteen weg in een afsluitbare vuilbak.
5. Ten slotte: was je handen opnieuw met water en zeep of een oplossing op alcoholbasis.

#### NA HET WASSEN:

1. Droog het hele masker. De binnenste lagen moeten ook volledig droog zijn.
2. Je kan dit in de droogtrommel doen. Zorg er dan voor dat je de filters schoonmaakt en daarna je handen wast.  
Je kan ook een haardroger gebruiken of droog je masker zelfs in de open lucht, op een schone en gedesinfecteerde drager.
3. Stoomstrijk je masker op maximale temperatuur.
4. Zodra het masker droog is, berg je het op in een schone, luchtdichte verpakking (bijvoorbeeld een plastic zak of diepvrieszak).

#### NEEM CONTACT OP MET ONS ALS JE VRAGEN HEBT:

Voor vragen over onze maskers of deze instructies kan je contact met ons opnemen:

KALANI S.A.  
Rue de Rosières 2  
1332 Genval, Belgium  
Telefoon: +32(0)2 654 18 11  
E-mail: [info@kalani-home.com](mailto:info@kalani-home.com)  
Website: [www.kalani-home.com](http://www.kalani-home.com)